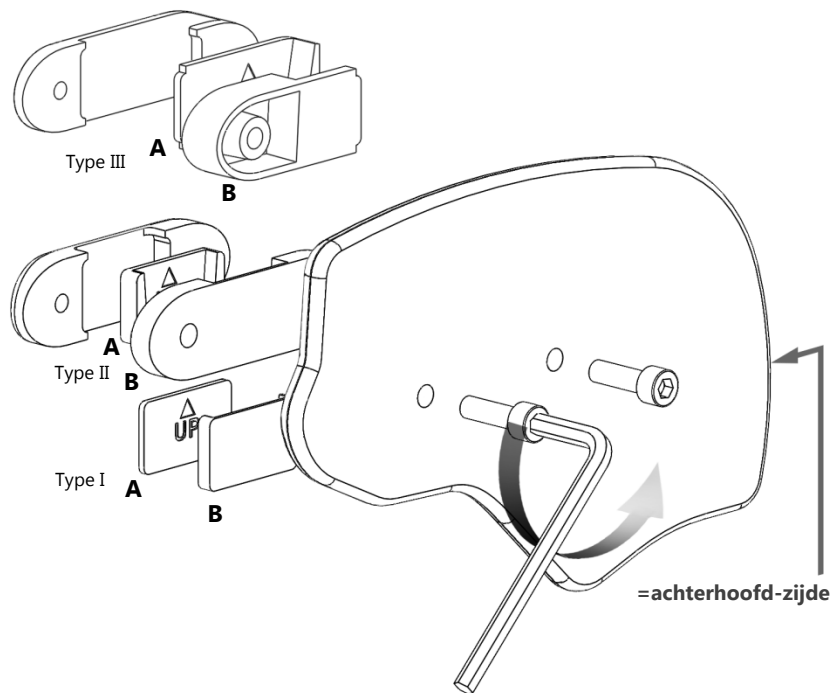


Stap 2 – bevestigen (uitvoeren in plaats van stap 2 uit Product documentatie voor bevestigingstype III)

Indien nodig; demonteer alle onderdelen (met behulp van inbussleutel maat 5mm)

LET OP!

Er zijn meerdere types bevestigingsmogelijkheden. Dit is afhankelijk van de dikte en de vorm van de hoofdsteunen van het röntgenapparaat.

Type I: voor platte hoofdsteunen

Type II: voor hoofdsteunen dikker dan de uitsparing in de bevestigingsbeugel


De bevestigingsmethode voor Type I en II (standaard) staat beschreven in de meegeleverde Product documentatie.

Type III: voor hoofdsteunen met afwijkende vormen, breder dan de uitsparing in de standaard bevestigingsbeugel (uitsluitend icm. brede uitvoering van de bevestigingsbeugel)


De afwijkende stap in bevestigingswijze zoals van toepassing voor Type III staat beschreven op de volgende pagina.

Type III:

Druk de bevestigingsadapter A in de bevestigingsbeugel in de aangegeven positie.

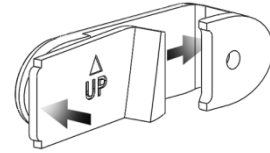

Plaats de bevestigingsbeugel met daarin adapter A om de hoofdsteun en bevestig de ACC door als eerste de korte bevestigingsbout te monteren.

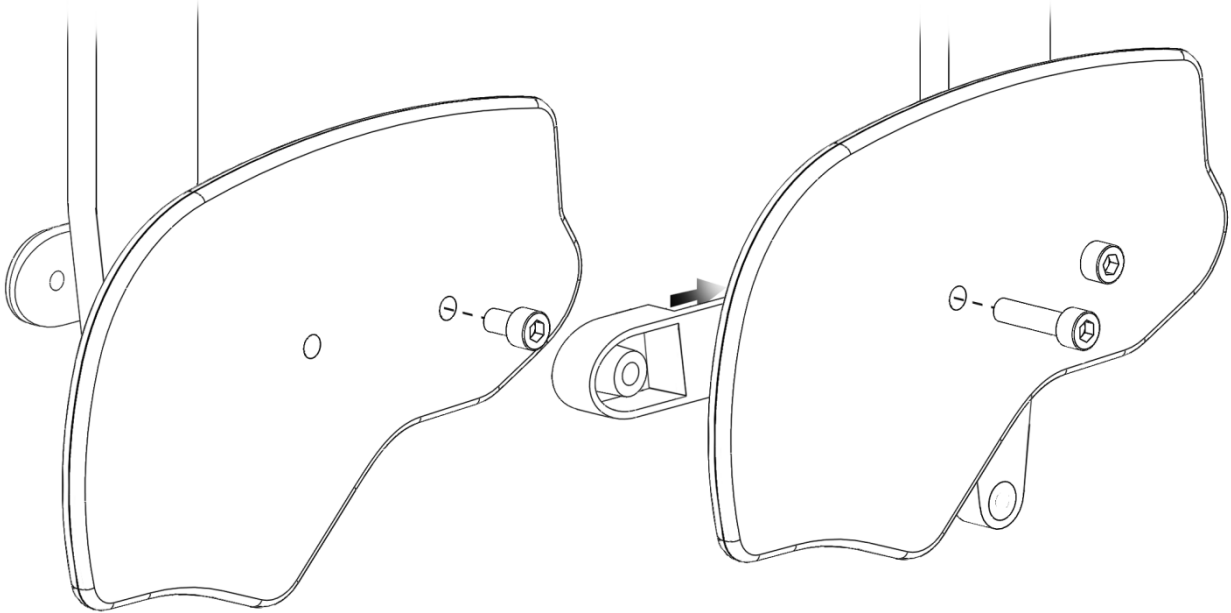

Plaats nu bevestigingsadapter B, door deze tussen de bevestigingsbeugel en de ACC tegen de hoofdsteun te schuiven. Breng hierna ook de lange bout aan.

Draai de bouten nog niet helemaal vast zodat de positie van de ACC nog gecorrigeerd kan worden.

LET OP!

De markeringen "Δ" op de bevestigingsadapters moeten altijd naar boven wijzen en zich aan de zijde bevinden die contact maakt met de hoofdsteun.